



App

GUIDA ALL'USO



Android



App Store





L'APP Vitha permette all'utilizzatore di personalizzare le prestazioni e le impostazioni d'ascolto, per offrire un'esperienza d'ascolto confortevole ed appagante.



NB: L'APP è oggetto di costante miglioramento e aggiornamento. Per questo motivo la versione installata nel vostro device potrebbe differire graficamente da quella riportata in questa guida. In questo caso seguite le istruzioni dell'App in vostro possesso .

Prima di iniziare

Verifica che

- La funzione Bluetooth dello smartphone sia attiva.
- L'amplificatore acustico sia ACCESO.
- Gli amplificatori acustici si trovino entro 1,5 metri dallo smartphone.
- Il sistema operativo del vostro device sia iOS 9 o successivo, Android 6 o successivo, schermo da 4" o oltre.

Opzione 1

Ricerca l'APP nell'App store o Google Play.



Opzione 2

Aprire la fotocamera dello smartphone.

Opzione 2

Aprire la fotocamera dello smartphone.

Scansionare uno dei seguenti QR code in base al vostro dispositivo per scaricare l'APP.

Android



iOS



NB: PER IOS 9 O SUPERIORE, IPHONE 5 O SUPERIORE, ANDROID 6.0 O SUPERIORE.

Collegare l'APP

Attivare il Bluetooth



Verificare che la connessione Bluetooth dello smartphone sia attiva prima di aprire l'APP.

Opzione 1

Scorrere il dito dal basso dello schermo verso l'alto per visualizzare il pannello di controllo e toccare l'icona  Bluetooth. (per iOS)

Opzione 2


Verificare le impostazioni del Bluetooth alla voce "Impostazioni".

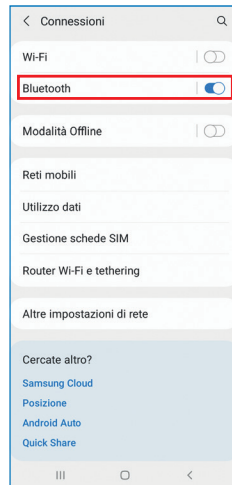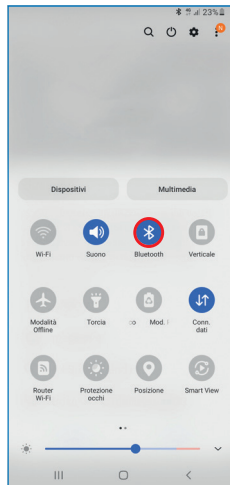

Collegare l'APP

Ricerca


Cercare gli amplificatori acustici seguendo i passaggi di seguito riportati.

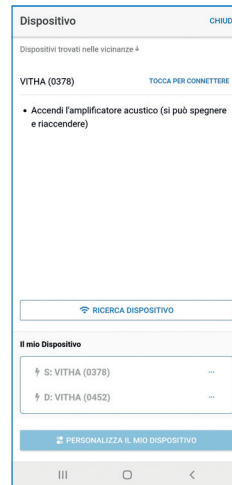

Collegare l'APP

Collegare


Collegare gli amplificatori acustici uno alla volta.

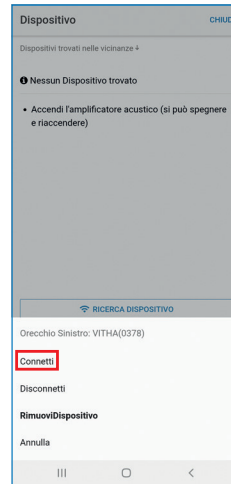

Collegare l'APP

Ulteriori impostazioni


Potete regolare alcune impostazioni selezionando l'icona con i tre puntini... alla destra del dispositivo selezionato.

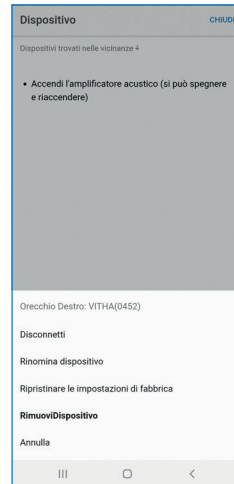

Impostazioni ON & OFF

Collegare


Selezionare il dispositivo corrispondente per modificare l'interruttore ON/OFF facendolo scorrere verso destra o sinistra. (Disponibile per alcuni modelli).

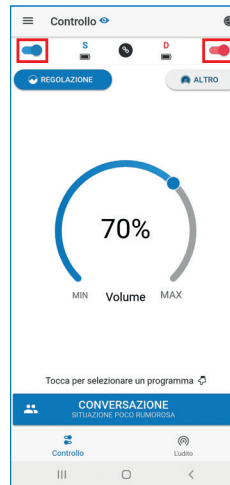

Regolazione

L'opzione regolazione offre la possibilità di regolare l'amplificatore acustico in autonomia.

Suggerimento: è consigliabile provare inizialmente le impostazioni originali e sottoporsi successivamente al test dell'udito.

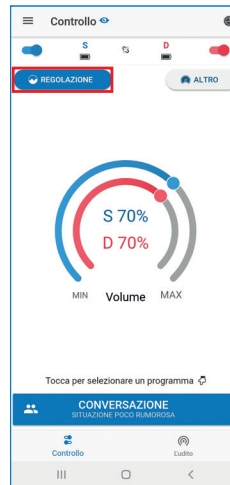

Regolazione

Trovare un posto tranquillo per il fitting e per il test dell'udito.



Regolazione

Seguire i passaggi indicati dall'APP e confermare l'ascolto dei toni di riferimento ad ogni frequenza considerata nel test.

Selezionare "Sì"  o "No"  in tutte le frequenze.

Regolazione

CHIUDI

ANNULLA

USCITA

10/10



4000 Hz, 33%

Il suono Beep è stato abbassato, lo senti?

 NO

 SÌ


|||

□

<


Test dell'udito

Al termine del test, l'APP riporterà il risultato ottenuto.

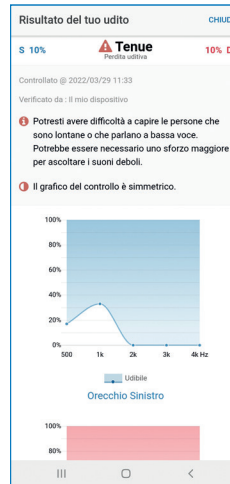

Test dell'udito

Il risultato ottenuto può essere utilizzato per modificare le impostazioni del dispositivo come riportato di seguito.

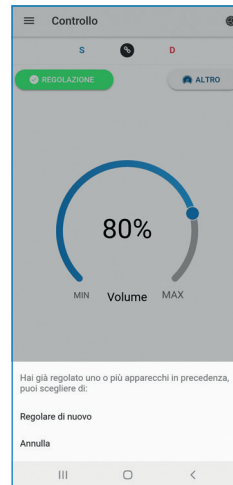

Controllo acustico

Per regolare le impostazioni audio, selezionare l'icona  "Controllo" in basso a sinistra nella schermata iniziale. Da qui è possibile regolare modalità/programmi e banda.





Controllo

Modalità

Scegliere dall'APP la modalità d'ascolto in base alle esigenze selezionando il programma. La funzione preimpostata dell'APP permette di regolare contemporaneamente il dispositivo destro e sinistro.

Suggerimento: usando il comando Programma dei dispositivi, la modalità d'ascolto può essere modificata individualmente.

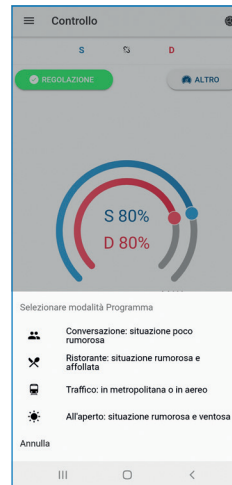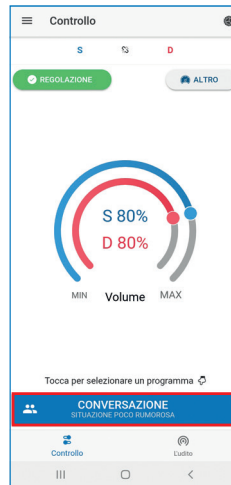


Controllo

Volume

Per regolare il volume degli amplificatori, potete trascinare il cursore lungo la circonferenza.

Selezionare la seguente icona  per regolare entrambi i dispositivi, o  per regolare il volume in modo indipendente.


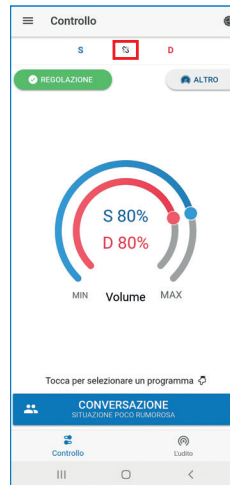


Controllo

Regolazione

Per regolare le bande, selezionare il comando Banda e trascinare i cursori sulla frequenza opportuna.

La funzione BANDA permette di personalizzare il livello di amplificazione acustica su diverse frequenze. COMPRIMI offre la possibilità di spostare i suoni forti da un livello di ascolto ad un altro affinché risultino più tollerabili.

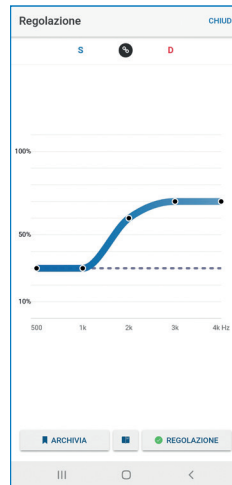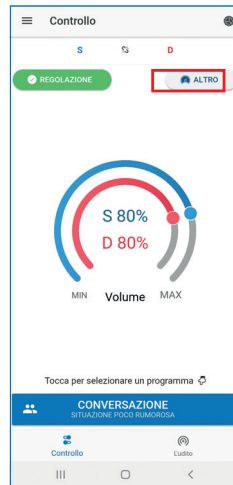

La funzione COMPRIMI è disponibile per alcuni modelli specifici.

Risoluzione dei problemi

Anomalia	Soluzione applicabile
Problemi tecnici con il dispositivo	Riavviare il dispositivo
Incompatibilità App e dispositivo	Controllare la versione iOS/Android
App obsoleta	Aggiornare all'ultima versione
Batteria inserita male	Reinserirla o sostituire con una nuova batteria
Malfunzionamento per causa sconosciuta	Contattare il fornitore dal quale avete acquistato il dispositivo





Vitha è un Brand di CRAI S.p.A

Via G. D'Annunzio, 35
35024 Bovolenta - PD
Tel. +39 049 5386777
craispa@craispa.com
www.vitha.life