

Amplificatore acustico e accessori

1 Amplificatore acustico

1 Microfono
2 Sensore touch
3 Dome
4 Indicatore

2 Custodia di ricarica

5 Contatto di ricarica
6 Indicatore

3 Dome

Dome tagliata

La dome tagliata riduce efficacemente la sensazione di occlusione ed i fischi/ronzii.

Dome chiusa

La dome chiusa riduce efficacemente suoni come fischi/ronzii.

NB:
La scelta della dome più idonea dipende dalle preferenze dell'utilizzatore, dalle esigenze uditive e dalla situazione d'ascolto.

Assemblare e indossare gli amplificatori acustici

4 Come assemblarli

Step 1
Scegliere una dome.

Step 2
Collegarla alla punta dell'amplificatore acustico.

NB: Rimuovere la linguetta adesiva e ricaricare completamente gli amplificatori acustici prima del primo utilizzo.

5 Come indossarli

Step 1
Afferrare l'amplificatore acustico tra pollice e indice

Step 2
Inserirlo nel condotto uditivo

Step 3
Muovere l'amplificatore acustico fino ad individuare la posizione più confortevole.

NB: se l'amplificatore acustico è acceso ma non è correttamente posizionato nell'orecchio, è possibile udire un fischio. Una volta corretta la posizione, il fischio non sarà più udibile.

Ricaricare gli amplificatori acustici

6 Come ricaricare gli amplificatori acustici

Step 1
Posizionare gli amplificatori acustici all'interno della custodia di ricarica

Step 2
Collegare il terminale più piccolo del cavetto USB alla porta di ricarica sulla custodia

Step 3
Collegare il terminale più grande del cavetto USB alla porta sull'alimentatore

Step 4
Collegare l'alimentatore alla corrente elettrica

NB: La custodia di ricarica è in grado di fornire 5 cicli di ricarica degli amplificatori acustici senza ulteriori collegamenti alla corrente elettrica.

Tempi di funzionamento	Amplificazione dei suoni: fino a 13 ore Musica in streaming: fino a 6 ore Uso durante le telefonate: fino a 4 ore
Tempi di ricarica	2.5-3 ore
Capacità del singolo amplificatore acustico/custodia di ricarica	60mAh /400mAh
Cicli di ricarica forniti dalla custodia	5 cicli

NB:
1) Riposizionare sempre gli amplificatori acustici nella custodia di ricarica quando non li utilizzate
2) Si raccomanda fortemente di ricaricare completamente gli amplificatori acustici prima del primo utilizzo.

Ricaricare gli amplificatori acustici

7 Indicatore luminoso

	Amplificatore acustico	Custodia di ricarica
Ricarica in corso	Luce blu	Luce verde in movimento
Ricarica completa	La luce blu si spegne	Luce verde fissa
Stato batteria	Indicatore di batteria scarica: la luce blu lampeggia lentamente; 3 bip ogni 4 secondi	Una luce verde fissa indica una carica residua del 25% così via.

Utilizzare gli amplificatori acustici

8 Accensione e spegnimento

Accensione e spegnimento automatici
Rimuovendolo dalla custodia di ricarica, il prodotto si accende automaticamente. Allo stesso modo, riponendolo nella custodia, l'amplificatore acustico si spegne.

Accensione e spegnimento manuali
Per accenderlo: toccare il sensore touch per 3 secondi fino a sentire l'indicazione vocale "Power On"
Per spegnerlo: toccare il sensore touch per 3 secondi fino a sentire l'indicazione vocale "Power Off".



NB: Toccare il sensore touch per 3 secondi per accendere o spegnere l'amplificatore acustico.

Utilizzare gli amplificatori acustici

9 Collegamento allo smartphone

Step 1: Rimuovere gli amplificatori acustici dalla custodia e indossarli. Sentirete l'indicazione vocale "Pairing".

Step 2: Attivare la connessione Bluetooth dal vostro smartphone.

Step 3: Cercare il dispositivo Bluetooth denominato "VITHA".

Step 4: Toccare "VITHA" per collegare l'amplificatore acustico allo smartphone. Una volta completato l'abbinamento, sentirete l'indicazione vocale "Connected".

Suggerimenti:

- 1) Se il vostro smartphone non rileva gli amplificatori acustici, provate a spegnere e riaccendere la connessione Bluetooth dal cellulare.
- 2) Se l'abbinamento non va a buon fine, potete riavviare gli amplificatori acustici come segue:
 - a. Spegner e riaccendere gli amplificatori acustici tenendo premuto il sensore touch.
 - b. Ricollocare gli amplificatori acustici nella custodia di ricarica per poi rimuoverli nuovamente..



10 Funzionalità durante la connessione allo smartphone

	Azione	Funzione
Ascolto di musica	Un breve tocco	Pausa/Play
Telefonata	Un breve tocco	Rispondi
	Un breve tocco	Riattacca
	Doppio breve tocco	Rifiuta

11 Amplificazione dei suoni

All'accensione, l'amplificatore acustico metterà automaticamente in uso l'ultimo programma impostato prima dello spegnimento. Per cambiare programma, toccare il sensore touch fino ad udire il numero di bip corrispondenti al programma desiderato.

Programma	Bip
1. Conversazione	1 bip
2. Ristorante	2 bip
3. Traffico	3 bip
4. All'aperto	4 bip

Utilizzare gli amplificatori acustici

12 Come usare l'APP

Step 1: Indossare l'amplificatore acustico e accenderlo.

Step 2: Attivare il Bluetooth dal vostro smartphone.

Step 3: Cercare l'amplificatore acustico "VITHA".

Step 4: Toccare il nome "VITHA" per collegare l'amplificatore acustico allo smartphone.

Step 5: Potete regolare il volume, modificare il programma d'ascolto e apportare altre personalizzazioni dall'APP.


Fare riferimento alla guida all'utilizzo dell'APP per un migliore utilizzo.




Manutenzione

13 Controllo degli amplificatori acustici

1. Pulire la superficie esterna e il contatto di ricarica
Per la pulizia, usare un panno morbido e asciutto. Utilizzare lo spazzolino dello strumento di pulizia in dotazione per pulire la punta dell'amplificatore acustico. Mantenere sempre asciutti i contatti di ricarica. Si consiglia l'uso quotidiano di una stazione deumidificante elettrica per ridurre l'accumulo di umidità e di cerume.

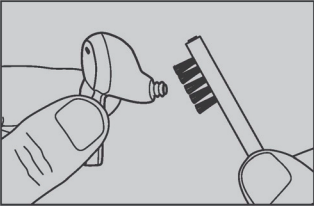

2. Pulire le dome
Usare lo spazzolino dello strumento di pulizia in dotazione per pulire le dome. Si raccomanda la sostituzione delle dome indicativamente ogni 2-3 mesi.

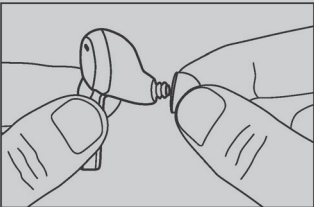

Evitare l'ingresso di acqua o altri liquidi nelle aperture dell'amplificatore acustico.